









Instrucciones de Uso

CABEZA INTERCAMBIABLE METALICA

Leyenda de los Símbolos Utilizados en los envases


REF	Código del Producto		Evitar exposición directa a luz solar
LOT	Numero de Lote		Mantener protegido de humedad
	Lea las Instrucciones de uso		Atención – Débil
Material SS	Acero Inoxidable ASTM F138		No utilizar si envase está roto
	Fecha de Fabricación		Fecha de validez
Estéril	R Esterilizado por Radiación Gamma		Producto de uso único

DESCRIPCIÓN:

La cabeza intercambiable metálica es un implante en formato esférico con diámetro de 22, 24, 26, 28, 30 y 32 mm ejerciendo la función de una junta homocinética en la cadera cuando de la sustitución total de la misma, trabaja encajada por medio de uno Cono Morse en el vástago femoral de la cadera y también en el componente acetabular.

La Cabeza intercambiable es fabricada en acero inoxidable tipo ASTM F138.

Las Cabeza Intercambiables Metálicas son presentadas en los siguientes modelos:

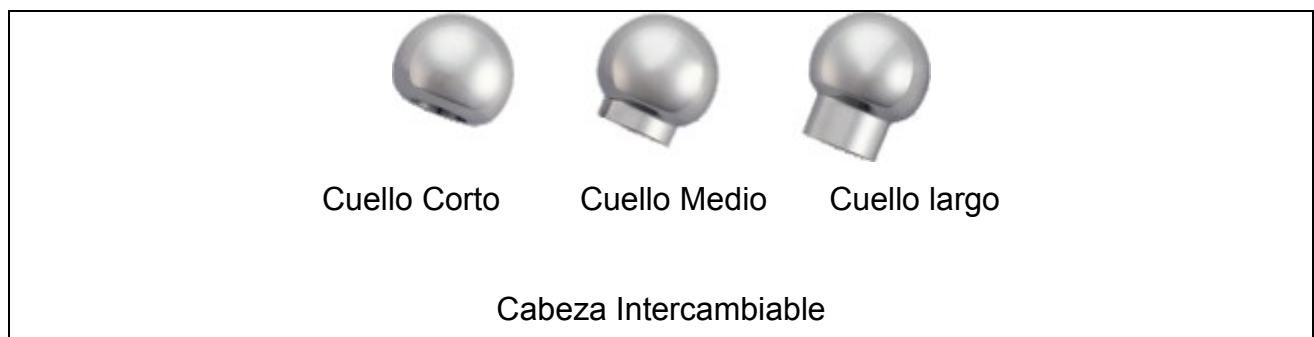



Cabeza Intercambiable Monopolar



Cabeza Intercambiable
(Cuello Standard/-2 mm/+ 3 mm)

Finalidad:

La Cabeza Intercambiable Metálica es indicada para sustituir la cabeza natural del fémur debido al desgaste prematura o trauma de la cabeza de fémur, permitiendo el movimiento homocinético del mismo.

Las Cabezas Intercambiables Metálicas están disponibles en las siguientes medidas:

Tabla- Descripción de las Cabezas Intercambiables Metálicas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
04.04.01.22000	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 10/11 Cuello Corto Ø22mm
04.04.01.22005	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 10/11 Cuello Medio Ø22mm
04.04.01.22010	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 10/11 Cuello Largo Ø22mm
04.04.01.22015	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 10/11 Cuello Extra-Largo Ø22mm
04.04.01.26000	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 10/11 Cuello Corto Ø26mm
04.04.01.26005	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 10/11 Cuello Medio Ø26mm
04.04.01.26010	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 10/11 Cuello Largo Ø26mm
04.04.01.26015	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 10/11 Cuello Extra-Largo Ø26mm

04.04.01.28000	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 10/11 Cuello Corto Ø28mm
04.04.01.28005	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 10/11 Cuello Medio Ø28mm
04.04.01.28010	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 10/11 Cuello Largo Ø28mm
04.04.01.28015	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 10/11 Cuello Extra-Largo Ø28mm
04.04.01.28030	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 10/11 Cuello Extra Largo + 15 Ø28mm
04.04.01.28035	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 10/11 Cuello Extra Largo + 20 Ø28mm
04.04.01.32000	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 10/11 Cuello Corto Ø32mm
04.04.01.32005	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 10/11 Cuello Medio Ø32mm
04.04.01.32010	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 10/11 Cuello Largo Ø32mm
04.04.01.32015	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 10/11 Cuello Extra-Largo Ø32mm
04.04.02.22000	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/13 Cuello Corto Ø22mm
04.04.02.22005	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/13 Cuello Medio Ø22mm
04.04.02.22010	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/13 Cuello Largo Ø22mm
04.04.02.22015	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/13 Cuello Extra-Largo Ø22mm
04.04.02.26000	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/13 Cuello Corto Ø26mm
04.04.02.26005	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/13 Cuello Medio Ø26mm
04.04.02.26010	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/13 Cuello Largo Ø26mm
04.04.02.26015	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/13 Cuello Extra-Largo Ø26mm
04.04.02.28000	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/13 Cuello Corto Ø28mm
04.04.02.28005	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/13 Cuello Medio Ø28mm
04.04.02.28010	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/13 Cuello Largo Ø28mm
04.04.02.28015	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/13 Cuello Extra-Largo Ø28mm
04.04.02.32000	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/13 Cuello Corto Ø32mm
04.04.02.32005	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/13 Cuello Medio Ø32mm
04.04.02.32010	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/13 Cuello Largo Ø32mm
04.04.02.32015	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/13 Cuello Extra-Largo Ø32mm
04.04.03.22000	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/14 Cuello Corto Ø22mm
04.04.03.22005	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/14 Cuello Medio Ø22mm
04.04.03.22010	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/14 Cuello Largo Ø22mm
04.04.03.22015	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/14 Cuello Extra-Largo Ø22mm
04.04.03.26000	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/14 Cuello Corto Ø26mm

04.04.03.26005	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/14 Cuello Medio Ø26mm
04.04.03.26010	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/14 Cuello Largo Ø26mm
04.04.03.26015	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/14 Cuello Extra-Largo Ø26mm
04.04.03.26022	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/14 Cuello Corto Ø26mm
04.04.03.28000	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/14 Cuello Corto Ø28mm
04.04.03.28005	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/14 Cuello Medio Ø28mm
04.04.03.28010	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/14 Cuello Largo Ø28mm
04.04.03.28015	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/14 Cuello Extra-Largo Ø28mm
04.04.03.32000	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/14 Cuello Corto Ø32mm
04.04.03.32005	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/14 Cuello Medio Ø32mm
04.04.03.32010	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/14 Cuello Largo Ø32mm
04.04.03.32015	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/14 Cuello Extra-Largo Ø32mm
04.04.04.01038	Cabeza Monopolar Ø38mm - Cono 12 /13
04.04.04.01039	Cabeza Monopolar Ø39mm - Cono 12 /13
04.04.04.01040	Cabeza Monopolar Ø40mm - Cono 12 /13
04.04.04.01041	Cabeza Monopolar Ø41mm - Cono 12 /13
04.04.04.01042	Cabeza Monopolar Ø42mm - Cono 12 /13
04.04.04.01043	Cabeza Monopolar Ø43mm - Cono 12 /13
04.04.04.01044	Cabeza Monopolar Ø44mm - Cono 12 /13
04.04.04.01045	Cabeza Monopolar Ø45mm - Cono 12 /13
04.04.04.01046	Cabeza Monopolar Ø46mm - Cono 12 /13
04.04.04.01047	Cabeza Monopolar Ø47mm - Cono 12 /13
04.04.04.01048	Cabeza Monopolar Ø48mm - Cono 12 /13
04.04.04.01049	Cabeza Monopolar Ø49mm - Cono 12 /13
04.04.04.01050	Cabeza Monopolar Ø50mm - Cono 12 /13
04.04.04.01051	Cabeza Monopolar Ø51mm - Cono 12 /13
04.04.04.01052	Cabeza Monopolar Ø52mm - Cono 12 /13
04.04.04.01053	Cabeza Monopolar Ø53mm - Cono 12 /13
04.04.04.01054	Cabeza Monopolar Ø54mm - Cono 12 /13
04.04.06.01038	Cabeza Monopolar Ø38mm - Cono 12 /14
04.04.06.01039	Cabeza Monopolar Ø 39 mm - Cono 12 /14

04.04.06.01040	Cabeza Monopolar Ø40mm - Cono 12 /14
04.04.06.01041	Cabeza Monopolar Ø 41 mm - Cono 12 /14
04.04.06.01042	Cabeza Monopolar Ø42mm - Cono 12 /14
04.04.06.01043	Cabeza Monopolar Ø43mm - Cono 12 /14
04.04.06.01044	Cabeza Monopolar Ø44mm - Cono 12 /14
04.04.06.01045	Cabeza Monopolar Ø45mm - Cono 12 /14
04.04.06.01046	Cabeza Monopolar Ø46mm - Cono 12 /14
04.04.06.01047	Cabeza Monopolar Ø47mm - Cono 12 /14
04.04.06.01048	Cabeza Monopolar Ø48mm - Cono 12 /14
04.04.06.01049	Cabeza Monopolar Ø49mm - Cono 12 /14
04.04.06.01050	Cabeza Monopolar Ø50mm - Cono 12 /14
04.04.06.01051	Cabeza Monopolar Ø 51 mm - Cono 12 /14
04.04.06.01052	Cabeza Monopolar Ø52mm - Cono 12 /14
04.04.06.01053	Cabeza Monopolar Ø53mm - Cono 12 /14
04.04.06.01054	Cabeza Monopolar Ø54mm - Cono 12 /14
04.04.07.22001	Cabeza Femoral Intercamb. Cono 12/14 mm Ø 22 mm - Cuello - 2 mm
04.04.07.22002	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/14 mm Ø 22 mm - Cuello Standard
04.04.07.22003	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/14 mm - Ø 22 mm Cuello +3mm
04.04.07.26001	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/14 mm Ø 26 mm - Cuello -2mm
04.04.07.26002	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/14 mm Ø 26 mm - Cuello Standard
04.04.07.26003	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/14 mm Ø 26 mm - Cuello +3mm
04.04.07.26004	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/14 mm Ø 26 mm - Cuello - 4 mm
04.04.07.26006	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/14 mm Ø 26 mm - Cuello +6mm
04.04.07.26009	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/14 mm Ø 26 mm - Cuello +9mm
04.04.07.28001	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/14 mm Ø 28 mm - Cuello -2mm
04.04.07.28002	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/14 mm Ø 28 mm - Cuello Standard
04.04.07.28003	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/14 mm Ø 28 mm - Cuello +3mm
04.04.07.28004	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/14 mm Ø 28 mm - Cuello - 4mm
04.04.07.28006	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/14 mm Ø 28 mm - Cuello +6mm
04.04.07.28009	Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/14 mm Ø 28 mm - Cuello +9mm

IMPORTANTE:

Para el implante de las Cabezas Intercambiables Metálicas es necesario el uso de instrumental específico que debe ser adquirido separadamente de los Cotilos.

El Instrumental para Implante de Cabezas Intercambiables Metálicas es Registrado en Anvisa con el nº 10417940033.

Consulte su representante MDT para mayores informaciones acerca del instrumental.

El Instrumental para Implante de las Cabezas Intercambiables Metálicas es compuesto de los ítems:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2.16.03.11250	EXTRACTOR DE CABEZAFEMORAL
2.16.04.40220	EXTRACTOR DE CABEZA METÁLICA
2.14.04.31155	IMPACTOR DE CABEZA METÁLICA
2.15.11.12300	FRESA INICIAL CÓNICA Ø12MM C/ CABO EM "T"
2.44.04.00038	DIMENSIONADOR DE CABEZA Ø38MM
2.44.04.00039	DIMENSIONADOR DE CABEZA Ø39MM
2.44.04.00040	DIMENSIONADOR DE CABEZA Ø40MM
2.44.04.00041	DIMENSIONADOR DE CABEZA Ø41MM
2.44.04.00042	DIMENSIONADOR DE CABEZA Ø42MM
2.44.04.00043	DIMENSIONADOR DE CABEZA Ø43MM
2.44.04.00044	DIMENSIONADOR DE CABEZA Ø44MM
2.44.04.00045	DIMENSIONADOR DE CABEZA Ø45MM
2.44.04.00046	DIMENSIONADOR DE CABEZA Ø46MM
2.44.04.00047	DIMENSIONADOR DE CABEZA Ø47MM
2.44.04.00048	DIMENSIONADOR DE CABEZA Ø48MM
2.44.04.00049	DIMENSIONADOR DE CABEZA Ø49MM
2.44.04.00050	DIMENSIONADOR DE CABEZA Ø50MM
2.44.04.00051	DIMENSIONADOR DE CABEZA Ø51MM
2.44.04.00052	DIMENSIONADOR DE CABEZA Ø52MM
2.44.04.00053	DIMENSIONADOR DE CABEZA Ø53MM

2.44.04.00054	DIMENSIONADOR DE CABEZA Ø54MM
02.18.07.22001	CABEZA PRUEBA DIAM.22 CUELLO CORTO 12/13
02.18.07.22002	CABEZA PRUEBA DIAM.22 CUELLO MEDIO 12/13
02.18.07.22003	CABEZA PRUEBA DIAM.22 CUELLO LARGO 12/13
02.18.07.26001	CABEZA PRUEBA DIAM.26 CUELLO CORTO 12/13
02.18.07.26002	CABEZA PRUEBA DIAM.26 CUELLO MEDIO 12/13
02.18.07.26003	CABEZA PRUEBA DIAM.26 CUELLO LARGO 12/13
02.18.07.28001	CABEZA PRUEBA DIAM.28 CUELLO CORTO 12/13
02.18.07.28002	CABEZA PRUEBA DIAM.28 CUELLO MEDIO 12/13
02.18.07.28003	CABEZA PRUEBA DIAM.28 CUELLO LARGO 12/13

Los instrumentos quirúrgicos están sujetos a desgaste durante la utilización normal y pueden quebrar. Los instrumentos quirúrgicos se destinan apenas para ser utilizados para el fin a que se destinan. Todos los instrumentos deben ser inspeccionados regularmente para verificar desgaste y daños.

Los instrumentos quirúrgicos deben ser adquiridos separadamente siempre del mismo fabricante del implante.

Los instrumentales son suplidos descontaminados, pero no esterilizados

Limpieza y Esterilización de los instrumentales

Cuando los instrumentos son utilizados por la primera vez, estos deben ser removidos de sus embalajes y limpios con alcohol para fines médicos a 70% + agua destilada 30%.

Después de la limpieza, los productos deben ser enjuagados con agua destilada estéril y secos con paño de limpieza que no libere fibras.

Importante

Detergentes con cloro libre o hidróxido de sodio **no deben** ser utilizados.

Esterilización

Antes de uso en cirugía, los instrumentales deben ser limpios como descrito arriba y esterilizados por autoclave. La esterilización no sustituye la limpieza, y nunca será atingida con material sucio.

El autoclavaje es un proceso seguro para esterilización, pero caso no haya controle en los parámetros operacionales, puede causar daños al instrumental:

Humedad+Alta temperatura+Oxígeno=Corrosión=Micro fisura=crack=Quiebra

El proceso de esterilización seleccionado, en cualquier caso, deberá cumplir a la norma EN556, que establece que la probabilidad teórica de presencia de microorganismos vitales será de hasta 1 sobre 10^6 (S.A.L. [Sterility Assurance Level] nivel de garantía de esterilidad = 10^{-6})

Para la limpieza y esterilización, observe los procedimientos adecuados. Como sugestión, utilice la norma ASTM F1744:1996.

El ciclo de esterilización recomendado es:

Método	Ciclo	Temperatura	Tempo de exposición
Vapor	Pre-vacuo	132° - 135° C [270° - 275° F]	Mínimo 10 minutos

Inspección

1-) Inspeccionar si los instrumentos presentan señales de daños en todos las etapas de manoseo.

2-) Si se detectan algún daño, consultar el representante de MDT - INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES SA., para orientación.

También se hace necesario, para el implante de la Cabeza Intercambiable, el uso de los siguientes ancilares, que deben ser adquiridos separadamente:

Em caso de Sistema Cementado:

Tabla – Cotilo Cementado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
04.01.02.26044	Cotilo Máxima STD Ø26x44mm
04.01.02.26046	Cotilo Máxima STD Ø26x46mm
04.01.02.26048	Cotilo Máxima STD Ø26x48mm
04.01.02.26050	Cotilo Máxima STD Ø26x50mm
04.01.02.26052	Cotilo Máxima STD Ø26x52mm
04.01.02.26054	Cotilo Máxima STD Ø26x54mm
04.01.02.26056	Cotilo Máxima STD Ø26x56mm
04.01.02.26058	Cotilo Máxima STD Ø26x58mm
04.01.02.26060	Cotilo Máxima STD Ø26x60mm
04.01.07.22040	Cotilo Tipo Charnley c/ Flange Ø22x40mm
04.01.07.22043	Cotilo Tipo Charnley c/ Flange Ø22x43mm
04.01.07.22046	Cotilo Tipo Charnley c/ Flange Ø22x46mm
04.01.07.22048	Cotilo Tipo Charnley c/ Flange Ø22x48mm
04.01.07.22050	Cotilo Tipo Charnley c/ Flange Ø22x50mm
04.01.07.22052	Cotilo Tipo Charnley c/ Flange Ø 22 x 52 mm
04.01.07.22054	Cotilo Tipo Charnley c/ Flange Ø 22 x 54 mm
04.01.07.28040	Cotilo Tipo Charnley c/ Flange Ø28x40mm
04.01.07.28043	Cotilo Tipo Charnley c/ Flange Ø28x43mm
04.01.07.28048	Cotilo Tipo Charnley c/ Flange Ø28x48mm
04.01.08.22040	Cotilo Tipo Charnley c/ Pared Posterior Ø22x40mm
04.01.08.22043	Cotilo Tipo Charnley c/ Pared Posterior Ø22x43mm
04.01.08.22044	Cotilo Tipo Charnley c/ Pared Posterior Ø22x44mm
04.01.08.22046	Cotilo Tipo Charnley c/ Pared Posterior Ø22x46mm
04.01.08.22048	Cotilo Tipo Charnley c/ Pared Posterior Ø22x48mm
04.01.08.22050	Cotilo Tipo Charnley c/ Pared Posterior Ø22x50mm
04.01.08.22052	Cotilo Tipo Charnley c/ Pared Posterior Ø22x52mm
04.01.08.22054	Cotilo Tipo Charnley c/ Pared Posterior Ø22x54mm
04.01.08.22056	Cotilo Tipo Charnley c/ Pared Posterior Ø22x56mm
04.01.08.28040	Cotilo Tipo Charnley c/ Pared Posterior Ø28x40mm
04.01.08.28043	Cotilo Tipo Charnley c/ Pared Posterior Ø28x43mm
04.01.08.28048	Cotilo Tipo Charnley c/ Pared Posterior Ø28x48mm
04.01.09.22040	Cotilo Tipo Charnley Standard Ø22x40mm
04.01.09.22043	Cotilo Tipo Charnley Standard Ø22x43mm
04.01.09.22046	Cotilo Tipo Charnley Standard Ø22x46mm
04.01.09.22048	Cotilo Tipo Charnley Standard Ø22x48mm
04.01.09.22050	Cotilo Tipo Charnley Standard Ø22x50mm
04.01.09.22052	Cotilo Tipo Charnley Standard Ø22x52mm
04.01.09.22054	Cotilo Tipo Charnley Standard Ø 22 x 54 mm
04.01.09.22056	Cotilo Tipo Charnley Standard Ø22x56mm
04.01.09.28043	Cotilo Tipo Charnley Standard Ø28x43mm
04.01.09.28046	Cotilo Tipo Charnley Standard Ø28x46mm
04.01.10.28044	Cotilo Tipo Muller c/ Pared Posterior Ø28x44mm

04.01.10.28046	Cotilo Tipo Muller c/ Pared Posterior Ø28x46mm
04.01.10.28048	Cotilo Tipo Muller c/ Pared Posterior Ø28x48mm
04.01.10.28050	Cotilo Tipo Muller c/ Pared Posterior Ø28x50mm
04.01.10.28052	Cotilo Tipo Muller c/ Pared Posterior Ø28x52mm
04.01.10.28054	Cotilo Tipo Muller c/ Pared Posterior Ø28x54mm
04.01.10.28056	Cotilo Tipo Muller c/ Pared Posterior Ø28x56mm
04.01.10.28058	Cotilo Tipo Muller c/ Pared Posterior Ø 28 x 58 mm
04.01.10.28060	Cotilo Tipo Muller c/ Pared Posterior Ø 28 x 60 mm
04.01.10.32050	Cotilo Tipo Muller c/ Pared Posterior Ø 32x50 mm
04.01.11.26044	Cotilo Tipo Muller STD Ø26x44mm
04.01.11.26046	Cotilo Tipo Muller STD Ø26x46mm
04.01.11.26048	Cotilo Tipo Muller STD Ø26x48mm
04.01.11.26050	Cotilo Tipo Muller STD Ø26x50mm
04.01.11.26052	Cotilo Tipo Muller STD Ø26x52mm
04.01.11.26054	Cotilo Tipo Muller STD Ø26x54mm
04.01.11.26056	Cotilo Tipo Muller STD Ø26x56mm
04.01.11.26058	Cotilo Tipo Muller STD Ø26x58mm
04.01.11.28044	Cotilo Tipo Muller STD Ø28x44mm
04.01.11.28046	Cotilo Tipo Muller STD Ø28x46mm
04.01.11.28048	Cotilo Tipo Muller STD Ø28x48mm
04.01.11.28050	Cotilo Tipo Muller STD Ø28x50mm
04.01.11.28052	Cotilo Tipo Muller STD Ø28x52mm
04.01.11.28054	Cotilo Tipo Muller STD Ø28x54mm
04.01.11.28056	Cotilo Tipo Muller STD Ø28x56mm
04.01.11.28058	Cotilo Tipo Muller STD Ø28x58mm
04.01.11.28060	Cotilo Tipo Muller STD Ø28x60mm
04.01.11.32048	Cotilo Tipo Muller STD Ø 32x48mm
04.01.11.32050	Cotilo Tipo Muller STD Ø 32x50mm
04.01.11.32054	Cotilo Tipo Muller STD Ø 32x54mm
04.01.12.22042	Cotilo SPOAC STD Ø 22 x 42 mm
04.01.12.22044	Cotilo SPOAC STD Ø22x44mm
04.01.12.22046	Cotilo SPOAC STD Ø22x46mm
04.01.12.28048	Cotilo SPOAC STD Ø 28 x 48 mm
04.01.12.28050	Cotilo SPOAC STD Ø28x50mm
04.01.12.28052	Cotilo SPOAC STD Ø28x52mm
04.01.13.22042	Cotilo SPOAC Ø22x42mm - C/ Espaciador
04.01.13.22044	Cotilo SPOAC Ø22x44mm - C/ Espaciador
04.01.13.22046	Cotilo SPOAC Ø22x46mm - C/ Espaciador
04.01.13.26042	Cotilo SPOAC Ø26x42mm - C/ Espaciador
04.01.13.26044	Cotilo SPOAC Ø26x44mm - C/ Espaciador
04.01.13.26046	Cotilo SPOAC Ø26x46mm - C/ Espaciador
04.01.13.26048	Cotilo SPOAC Ø26x48mm - C/ Espaciador
04.01.13.26050	Cotilo SPOAC Ø26x50mm - C/ Espaciador
04.01.13.26052	Cotilo SPOAC Ø26x52mm - C/ Espaciador
04.01.13.28048	Cotilo SPOAC Ø28x48mm - C/ Espaciador
04.01.13.28050	Cotilo SPOAC Ø28x50mm - C/ Espaciador

04.01.13.28052	Cotilo SPOAC Ø28x52mm - C/ Espaciador
04.01.13.28054	Cotilo SPOAC Ø28x54mm - C/ Espaciador
04.01.13.28056	Cotilo SPOAC Ø28x56mm - C/ Espaciador
04.01.13.28058	Cotilo SPOAC Ø28x58mm - C/ Espaciador
04.01.13.28060	Cotilo SPOAC Ø28x60mm - C/ Espaciador
04.01.13.28062	Cotilo SPOAC Ø28x62mm - C/ Espaciador
04.01.14.22040	Cotilo Tipo Charnley c/ Flange Ø22x40mm - C/ Espaciador
04.01.14.22043	Cotilo Tipo Charnley c/ Flange Ø22x43mm - C/ Espaciador
04.01.14.22044	Cotilo Tipo Charnley c/ Flange Ø22x44mm - C/ Espaciador
04.01.14.22046	Cotilo Tipo Charnley c/ Flange Ø22x46mm - C/ Espaciador
04.01.14.22048	Cotilo Tipo Charnley c/ Flange Ø22x48mm - C/ Espaciador
04.01.14.28050	Cotilo Tipo Charnley c/ Flange Ø28x50mm - C/ Espaciador
04.01.14.28052	Cotilo Tipo Charnley c/ Flange Ø28x52mm - C/ Espaciador
04.01.14.28054	Cotilo Tipo Charnley c/ Flange Ø28x54mm - C/ Espaciador
04.01.14.28056	Cotilo Tipo Charnley c/ Flange Ø28x56mm - C/ Espaciador
04.01.14.28058	Cotilo Tipo Charnley c/ Flange Ø28x58mm - C/ Espaciador
04.01.14.28060	Cotilo Tipo Charnley c/ Flange Ø28x60mm - C/ Espaciador
04.01.14.28062	Cotilo Tipo Charnley c/ Flange Ø28x62mm - C/ Espaciador
04.01.15.22040	Cotilo Tipo Charnley c/ Pared Ø22x40mm - C/ Espaciador
04.01.15.22043	Cotilo Tipo Charnley c/ Pared Ø22x43 mm -C/ Espaciador
04.01.15.22046	Cotilo Tipo Charnley c/ Pared Ø22x46mm - C/ Espaciador
04.01.15.22048	Cotilo Tipo Charnley c/ Pared Ø22x48 mm - C/ Espaciador
04.01.16.22040	Cotilo Tipo Charnley STD Ø22x40mm - C/ Espaciador
04.01.16.22043	Cotilo Tipo Charnley STD Ø22x43mm - C/ Espaciador
04.01.16.22046	Cotilo Tipo Charnley STD Ø22x46mm - C/ Espaciador
04.01.16.22048	Cotilo Tipo Charnley STD Ø22x48mm - C/ Espaciador
04.01.17.28044	Cotilo Tipo Muller c/ Pared Ø28x44mm - C/ Espaciador
04.01.17.28046	Cotilo Tipo Muller c/ Pared Ø28x46mm - C/ Espaciador
04.01.17.28048	Cotilo Tipo Muller c/ Pared Ø28x48mm - C/ Espaciador
04.01.17.28050	Cotilo Tipo Muller c/ Pared Ø28x50mm - C/ Espaciador
04.01.17.28052	Cotilo Tipo Muller c/ Pared Ø28x52mm - C/ Espaciador
04.01.17.28054	Cotilo Tipo Muller c/ Pared Ø28x54mm - C/ Espaciador
04.01.17.28056	Cotilo Tipo Muller c/ Pared Ø28x56mm - C/ Espaciador
04.01.17.28058	Cotilo Tipo Muller c/ Pared Ø28x58mm - C/ Espaciador
04.01.17.28060	Cotilo Tipo Muller c/ Pared Ø28x60mm - C/ Espaciador
04.01.17.28062	Cotilo Tipo Muller c/ Pared Ø28x62mm - C/ Espaciador
04.01.18.28044	Cotilo Tipo Muller STD Ø28x44mm - C/ Espaciador
04.01.18.28046	Cotilo Tipo Muller STD Ø28x46mm - C/ Espaciador
04.01.18.28048	Cotilo Tipo Muller STD Ø28x48 mm - C/ Espaciador
04.01.18.28050	Cotilo Tipo Muller STD Ø28x50mm - C/ Espaciador
04.01.18.28052	Cotilo Tipo Muller STD Ø28x52mm - C/ Espaciador
04.01.18.28054	Cotilo Tipo Muller STD Ø28x54mm - C/ Espaciador
04.01.18.28056	Cotilo Tipo Muller STD Ø28x56mm - C/ Espaciador
04.01.18.28058	Cotilo Tipo Muller STD Ø28x58mm - C/ Espaciador
04.01.18.28060	Cotilo Tipo Muller STD Ø28x60mm - C/ Espaciador
04.01.21.22044	Cotilo Tipo Muller c/ Traba Ø22x44mm

04.01.21.22046	Cotilo Tipo Muller c/ Traba Ø22x46mm
04.01.21.22048	Cotilo Tipo Muller c/ Traba Ø22x48mm
04.01.21.22050	Cotilo Tipo Muller c/ Traba Ø22x50mm
04.01.21.22052	Cotilo Tipo Muller c/ Traba Ø22x52mm
04.01.21.22054	Cotilo Tipo Muller c/ Traba Ø22x54mm
04.01.21.22056	Cotilo Tipo Muller c/ Traba Ø22x56mm
04.01.21.22060	Cotilo Tipo Muller c/ Traba Ø22x60mm
04.01.21.28044	Cotilo Tipo Muller c/ Traba Ø 28 x 44 mm
04.01.21.28046	Cotilo Tipo Muller c/ Traba Ø 28 x 46 mm
04.01.21.28048	Cotilo Tipo Muller c/ Traba Ø 28 x 48 mm
04.01.21.28050	Cotilo Tipo Muller c/ Traba Ø 28 x 50 mm
04.01.21.28052	Cotilo Tipo Muller c/ Traba Ø 28 x 52 mm
04.01.21.28054	Cotilo Tipo Muller c/ Traba Ø 28 x 54 mm
04.01.23.26044	Cotilo Máxima STD Ø26x44mm - C/ Espaciador
04.01.23.26048	Cotilo Máxima STD Ø26x48mm - C/ Espaciador
04.01.23.26052	Cotilo Máxima STD Ø26x52mm - C/ Espaciador
04.01.23.26056	Cotilo Máxima STD Ø26x56mm - C/ Espaciador

Tabla – Vástago Cementado en Acero Inoxidable

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
04.30.01.37001	Prótesis Femoral Máxima 37,5 mm Cono 12 /13 Primaria N°1
04.30.01.37002	Prótesis Femoral Máxima 37,5 mm Cono 12 /13 Primaria n°2
04.30.01.37003	Prótesis Femoral Máxima 37,5 mm Cono 12 /13 Primaria n°3
04.30.02.37001	Prótesis Femoral Máxima 37,5 mm Cono 12 /14 Primaria n°1
04.30.02.37002	Prótesis Femoral Máxima 37,5 mm Cono 12 /14 Primaria n°2
04.30.02.37003	Prótesis Femoral Máxima 37,5 mm Cono 12 /14 Primaria N°3
04.30.03.44001	Prótesis Femoral Máxima 44,0 mm Cono 12 /13 Primaria n°1
04.30.03.44002	Prótesis Femoral Máxima 44,0 mm Cono 12 /13 Primaria n°2
04.30.03.44003	Prótesis Femoral Máxima 44,0 mm Cono 12 /13 Primaria n°3
04.30.03.44004	Prótesis Femoral Máxima 44,0 mm Cono 12 /13 Primaria N° 4
04.30.04.44001	Prótesis Femoral Máxima 44,0 mm Cono 12 /13 Revisión N° 1
04.30.04.44002	Prótesis Femoral Máxima 44,0 mm Cono 12 /13 Revisión n°2
04.30.04.44003	Prótesis Femoral Máxima 44,0 mm Cono 12 /13 Revisión n°3
04.30.04.44251	Prótesis Femoral Máxima 44, 0 x 250mm Cono 12 /13- Revisión n° 1
04.30.04.44253	Prótesis Femoral Máxima 44,0x250mm - Cono 12 /13 - Revisión n° 3
04.30.04.44301	Prótesis Femoral Máxima 44, 0 x 300mm Cono 12 /13 - Revisión n° 1
04.30.05.44001	Prótesis Femoral Máxima 44,0 mm Cono 12 /14 Primaria n° 1
04.30.05.44002	Prótesis Femoral Máxima 44,0 mm Cono 12 /14 Primaria n° 2
04.30.05.44003	Prótesis Femoral Máxima 44,0 mm Cono 12 /14 Primaria n° 3
04.30.05.44004	Prótesis Femoral Máxima 44,0 mm Cono 12 /14 Primaria N° 4
04.30.06.44001	Prótesis Femoral Máxima 44,0 mm Cono 12 /14 Revisión N° 1
04.30.06.44002	Prótesis Femoral Máxima 44,0 mm Cono 12 /14 Revisión N° 2
04.30.06.44003	Prótesis Femoral Máxima 44,0 mm Cono 12 /14 Revisión N° 3
04.30.06.44231	Prótesis Femoral Máxima 44,0 x 230 mm Cono 12 /14 Revisión N° 1
04.30.06.44232	Prótesis Femoral Máxima 44,0 x 230 mm Cono 12 /14 Revisión N° 2
04.30.06.44233	Prótesis Femoral Máxima 44,0 x 230 mm Cono 12 /14 Revisión N° 3

04.30.13.09117	Prótesis Fem. MD4 S/ Revestimiento Cono 10/11 - Prim.09 x 117 mm
04.30.13.10122	Prótesis Fem. MD4 S/ Revestimiento Cono 10/11Prim.10 x 122
04.30.13.11127	Prótesis Fem. MD4 S/ Revestimiento Cono 10/11 Prim. 11 x 127
04.30.13.12132	Prótesis Fem. MD4 S/ Revestimiento Cono 10/11 Primaria 12 x 132
04.30.13.13137	Prótesis Fem. MD4 S/ Revestimiento Cono 10/11 Prim.13 x 137
04.30.13.14142	Prótesis Fem. MD4 S/ Revestimiento Cono 10/11 Prim.14 x 142
04.30.13.15147	Prótesis Fem. MD4 S/ Revestimiento Cono 10/11 Prim.15 x 147
04.30.13.16152	Prótesis Fem. MD4 S/ Revestimiento Cono 10/11 - Prim. 16 x 152 mm
04.30.13.17157	Prótesis Fem. MD4 S/ Revestimiento Cono 10/11 Prim.17 x 157
04.30.14.10170	Prótesis Fem. MD4 S/ Revestimiento Cono 10/11 - Rev. 10 x 170 mm
04.30.14.11180	Prótesis Fem. MD4 S/ Revestimiento Cono 10/11 - Rev. 11 x 180 mm
04.30.14.12190	Prótesis Fem. MD4 S/ Revestimiento Cono 10/11 - Rev 12 x 190 mm
04.30.14.13200	Prótesis Fem. MD4 S/ Revestimiento Cono 10/11 - Rev. 13 x 200 mm
04.30.14.14210	Prótesis Fem. MD4 S/ Revestimiento Cono 10/11 - Rev 14 x 260 mm
04.30.14.14260	Prótesis Fem. MD4 S/ Revestimiento Cono 10/11 - Rev 14 x 260 mm
04.30.14.15220	Prótesis Fem. MD4 S/ Revestimiento Cono 10/11 - Rev 15 x 220 mm
04.30.14.16230	Prótesis Fem. MD4 S/ Revestimiento Cono 10/11 - Rev 16 x 230 mm
04.30.14.17240	Prótesis Fem. MD4 S/ Revestimiento Cono 10/11 - Prim. Rev 17 x 240 mm
04.30.15.09117	Prótesis Fem. MD4 S/ Revestimiento Cono 12 /14 - Prim. 9 x 117 mm
04.30.15.10122	Prótesis Fem. MD4 S/Revestimiento Cono 12 /14 - Prim. 10 x 122 mm
04.30.15.10157	Prótesis Fem. MD4 S/Revestimiento Cono 12 /14 - Prim. 10x157mm
04.30.15.11127	Prótesis Fem. MD4 S/Revestimiento Cono 12 /14 - Prim. 11 x 127 mm
04.30.15.12132	Prótesis Fem. MD4 S/Revestimiento Cono 12 /14 - Prim. 12 x 132 mm
04.30.15.12157	Prótesis Fem. MD4 S/Revestimiento Cono 12 /14 - Prim. 12x157mm
04.30.15.13137	Prótesis Fem. MD4 S/Revestimiento Cono 12 /14 - Prim. 13 x 137 mm
04.30.15.14142	Prótesis Fem. MD4 S/Revestimiento Cono 12 /14 - Prim. 14 x 142 mm
04.30.15.14157	Prótesis Fem. MD4 S/Revestimiento Cono 12 /14 - Prim. 14x157mm
04.30.15.15147	Prótesis Fem. MD4 S/Revestimiento Cono 12 /14 - Prim. 15 x 147 mm
04.30.15.16152	Prótesis Fem. MD4 S/Revestimiento Cono 12 /14 - Prim. 16 x 152 mm
04.30.15.17157	Prótesis Fem. MD4 S/Revestimiento Cono 12 /14 - Prim. 17 x 157 mm
04.30.16.10170	Prótesis Femoral MD4 sin Revestimiento Cono 12 /14 - Rev. 10 x 170 mm
04.30.16.11180	Prótesis Femoral MD4 sin Revestimiento Cono 12 /14 - Revisión 11 x 180 mm
04.30.16.12190	Prótesis Femoral MD4 sin Revestimiento Cono 12 /14 - Revisión 12 x 190 mm
04.30.16.12200	Prótesis Femoral MD4 sin Revestimiento Cono 12 /14 - Revisión 12x200mm
04.30.16.12240	Prótesis Femoral MD4 sin Revestimiento Cono 12 /14 - Revisión 12x240mm
04.30.16.12300	Prótesis Femoral MD4 sin Revestimiento Cono 12 /14 - Revisión 12x300mm
04.30.16.13200	Prótesis Femoral MD4 sin Revestimiento Cono 12 /14 - Revisión 13 x 200 mm
04.30.16.14200	Prótesis Femoral MD4 sin Revestimiento Cono 12 /14 - Revisión 14x200mm
04.30.16.14210	Prótesis Femoral MD4 sin Revestimiento Cono 12 /14 - Revisión 14 x 210 mm
04.30.16.14240	Prótesis Femoral MD4 sin Revestimiento Cono 12 /14 - Revisión 14x240mm
04.30.16.14300	Prótesis Femoral MD4 sin Revestimiento Cono 12 /14 - Revisión 14x300mm
04.30.16.15220	Prótesis Femoral MD4 sin Revestimiento Cono 12 /14 - Revisión 15 x 220 mm
04.30.16.16200	Prótesis Femoral MD4 sin Revestimiento Cono 12 /14 - Revisión 16x200mm
04.30.16.16230	Prótesis Femoral MD4 sin Revestimiento Cono 12 /14 - Revisión 16 x 230 mm
04.30.16.16240	Prótesis Femoral MD4 sin Revestimiento Cono 12 /14 - Revisión 16x240mm
04.30.16.16300	Prótesis Femoral MD4 sin Revestimiento Cono 12 /14 - Revisión 16x300mm
04.30.16.17240	Prótesis Femoral MD4 sin Revestimiento Cono 12 /14 - Revisión 17 x 240 mm

04.30.17.05130	SPOAC Vástago Femoral Cono 10/11 05 x 130 mm
04.30.17.06135	SPOAC Vástago Femoral Cono 10/11 06 x 135 mm
04.30.17.07140	SPOAC Vástago Femoral Cono 10/11 07 x 140 mm
04.30.17.08145	SPOAC Vástago Femoral Cono 10/11 08 x 145 mm
04.30.17.09150	SPOAC Vástago Femoral Cono 10/11 09 x 150 mm
04.30.17.10155	SPOAC Vástago Femoral Cono 10/11 10 x 155 mm
04.30.18.05130	SPOAC Vástago Femoral Cono 12 /14 05 x 130 mm
04.30.18.06135	SPOAC Vástago Femoral Cono 12 /14 06 x 135 mm
04.30.18.07140	SPOAC Vástago Femoral Cono 12 /14 07 x 140 mm
04.30.18.08145	SPOAC Vástago Femoral Cono 12 /14 08 x 145 mm
04.30.18.09150	SPOAC Vástago Femoral Cono 12 /14 09 x 150 mm
04.30.18.10155	SPOAC Vástago Femoral Cono 12 /14 10 x 155 mm
04.30.20.00112	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular Cono 12 /13 Primaria Estrecha 35
04.30.20.01112	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular Cono 12 /13 Primaria Estrecha 40
04.30.20.02112	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular c.12/13 Primaria Standard 35
04.30.20.03112	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular c.12/13 Primaria Tipo Standard 40
04.30.20.04112	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular Cono 12 /13 Primaria c/ Flange
04.30.20.05112	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular 12/13 Primaria Extra Reforzada
04.30.20.06112	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular 12/13 Primaria Cuello 10 mm
04.30.20.07112	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular 12/13 Primaria Cuello 20 mm
04.30.21.00000	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular 12/13 Revisión Estrecha 35
04.30.21.01000	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular 12/13 Revisión 200mm Estrecha 40
04.30.21.02000	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular 12/13 Revisión Std 35
04.30.21.03000	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular 12/13 Revisión Standard 40
04.30.21.04000	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular 12/13 Revisión 200mm c/ Flange
04.30.21.04060	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular 12/13 Revisión c/ Flange+60
04.30.21.04090	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular 12/13 Revisión C/ Flange+90
04.30.21.05000	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular 12/13 Revisión Extra Reforzada
04.30.21.06000	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular 12/13 Revisión Cuello 10 mm
04.30.21.07000	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular 12/13 Revisión Cuello 20 mm
04.30.22.00112	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular 12/14 Prim. Estrecha 35
04.30.22.01112	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular 12/14 Prim Estrecha 40
04.30.22.02112	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular 12/14 Prim. Standard 35
04.30.22.03112	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular 12/14 Prim. Standard 40
04.30.22.04112	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular 12/14 Primaria c/ Flange
04.30.22.05112	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular 12/14 Primaria Extra Reforzada
04.30.22.06112	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular 12/14 Primaria Cuello 10
04.30.22.07112	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular 12/14 Primaria Cuello 20
04.30.23.00000	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular 12/14 Revisión Estrecha 35
04.30.23.01000	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular 12/14 Revisión Estrecha 40
04.30.23.02000	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular 12/14 Revisión Standard 35
04.30.23.03000	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular 12/14 Revisión Standard 40
04.30.23.04000	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular 12/14 Revisión C/ Flange
04.30.23.05000	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular 12/14 Revisión Extra Reforzada
04.30.23.06000	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular 12/14 Revisión Cuello 10 mm
04.30.23.07000	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular 12/14 Revisión Cuello 20 mm
04.30.28.00055	Prótesis Muller Cono 12 /13 5,5 mm Prim.

04.30.28.00075	Prótesis Muller Cono 12 /13 7,5 mm Prim.
04.30.28.00100	Prótesis Muller Cono 12 /13 10,0 mm Prim.
04.30.28.00125	Prótesis Muller Cono 12 /13 12,5 mm Prim.
04.30.28.00150	Prótesis Muller Cono 12 /13 15,0 mm Prim.
04.30.28.00175	Prótesis Muller Cono 12 /13 17,5 mm Prim.
04.30.28.00200	Prótesis Muller Cono 12 /13 20,0 mm Prim.
04.30.29.00055	Prótesis Femoral Tipo Muller Modular Cono 12 /13 Revisión 5,5m
04.30.29.00075	Prótesis Femoral Tipo Muller Modular Cono 12 /13 Revisión 75 mm
04.30.29.00100	Prótesis Femoral Tipo Muller Modular Cono 12 /13 Revisión 10,0 mm
04.30.29.00125	Prótesis Femoral Tipo Muller Modular Cono 12 /13 Revisión 12,5 mm
04.30.29.00150	Prótesis Femoral Tipo Muller Modular Cono 12 /13 Revisión 15,0 mm
04.30.29.00175	Prótesis Femoral Tipo Muller Modular Cono 12 /13 Revisión 17,5 mm
04.30.29.00200	Prótesis Femoral Tipo Muller Modular Cono 12 /13 Revisión 20,0 mm
04.30.30.00055	Prótesis Femoral Tipo Muller Modular Cono 12/14 Prim. 5,5 mm
04.30.30.00075	Prótesis Femoral Tipo Muller Modular Cono 12/14 Prim. 7,5 mm
04.30.30.00100	Prótesis Femoral Tipo Muller Modular Cono 12/14 Prim.10,0 mm
04.30.30.00125	Prótesis Femoral Tipo Muller Modular Cono 12/14 Prim. 12,5 mm
04.30.30.00150	Prótesis Femoral Tipo Muller Modular Cono 12/14 Prim. 15,0 mm
04.30.30.00175	Prótesis Femoral Tipo Muller Modular Cono 12/14 Prim. 17,5 mm
04.30.30.00200	Prótesis Femoral Tipo Muller Modular Cono 12/14 Prim. 20,0 mm
04.30.31.00075	Prótesis Femoral Tipo Muller Modular Cono 12 /14 Revisión 7,5 mm
04.30.31.00100	Prótesis Femoral Tipo Muller Modular Cono 12 /14 Revisión 10 mm
04.30.31.00125	Prótesis Femoral Tipo Muller Modular Cono 12 /14 Revisión 12,5 mm
04.30.31.00150	Prótesis Femoral Tipo Muller Modular Cono 12 /14 Revisión 15,0 mm
04.30.31.00175	Prótesis Femoral Tipo Muller Modular Cono 12 /14 Revisión 17,5 mm
04.30.31.00200	Prótesis Femoral Tipo Muller Modular Cono 12 /14 Revisión 20 mm
04.30.37.00000	Prótesis Modular Tipo Thompson Cono 12 /13
04.30.37.00001	Prótesis Modular Tipo Thompson Cono 12 /14
04.30.41.00112	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular Cono 10/11 Primaria Estrecha 35
04.30.41.01112	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular Cono 10/11 Primaria Estrecha 40
04.30.41.02112	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular Cono 10/11 Primaria Standard 35
04.30.41.03112	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular Cono 10/11 Primaria Standard 40
04.30.41.04112	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular Cono 10/11 Primaria c/ Flange
04.30.41.05112	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular Cono 10/11 Prim. Extra Reforzada
04.30.41.06112	Prótesis Femoral Tipo Chanrley Modular Cono 10/11 Primaria Cuello 10mm
04.30.41.07112	Prótesis Femoral Tipo Charnley Modular Cono 10/11 Primario Cuello 20mm
04.30.42.00055	Prótesis Femoral Tipo Muller Modular Cono 10/11 Primaria 5,5mm
04.30.42.00075	Prótesis Femoral Tipo Muller Modular Cono 10/11 Primaria 7,5mm
04.30.42.00100	Prótesis Femoral Tipo Muller Modular Cono 10/11 Primaria 10,0mm
04.30.42.00125	Prótesis Femoral Tipo Muller Modular Cono 10/11 Primaria 12,5mm
04.30.42.00150	Prótesis Femoral Tipo Muller Modular Cono 10/11 Primaria 15,0mm
04.30.42.00175	Prótesis Femoral Tipo Muller Modular Cono 10/11 Primaria 17,5mm
04.30.42.00200	Prótesis Femoral Tipo Muller Modular Cono 10/11 Primaria 20,0mm

El Instrumental para Vástago Cementado es registrado en Anvisa con el nº 10417940039

Tabla – Vástago Cementado en Cromo Cobalto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
04.30.01	Prótesis Femoral Cementada 12/13	37,5 mm - 01
		37,5 mm - 02
		37,5 mm - 03
04.30.02	Prótesis Femoral Cementada 12/14	37,5 mm - 01
		37,5 mm - 02
		37,5 mm - 03
04.30.03	Prótesis Femoral Cementada 12/13	44,0 mm - 01
		44,0 mm - 02
		44,0 mm - 03
		44,0 mm - 04
04.30.05	Prótesis Femoral Cementada 12/14	44,0 mm - 01
		44,0 mm - 02
		44,0 mm - 03
		44,0 mm - 04
04.30.04	Prótesis Femoral Cementada Revisión 12/13	44,0 mm - 01
		44,0 mm - 02
		44,0 mm - 03
		44,0 mm - 04
04.30.06	Prótesis Femoral Cementada Revisión 12/14	44,0 mm - 01
		44,0 mm - 02
		44,0 mm - 03
		44,0 mm - 04

El Instrumental para Vástago Cementado CrCo es registrado en Anvisa con el nº 10417940023.

En caso de Sistema sin Cemento:

Tabla – Inseto Acetabular

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
04.13.01.22042	Inseto Acetabular Traba Lateral Ø22 x 42 mm
04.13.01.22044	Inseto Acetabular Traba Lateral Ø22 x 44 mm
04.13.01.22046	Inseto Acetabular Traba Lateral Ø22 x 46 mm
04.13.01.22048	Inseto Acetabular Traba Lateral Ø22 x 48 mm
04.13.01.22050	Inseto Acetabular Traba Lateral Ø22 x 50 mm
04.13.01.22052	Inseto Acetabular Traba Lateral Ø22 x 52 mm
04.13.01.22054	Inseto Acetabular Traba Lateral Ø22 x 54 mm
04.13.01.22056	Inseto Acetabular Traba Lateral Ø22 x 56 mm
04.13.01.22058	Inseto Acetabular Traba Lateral Ø22 x 58 mm

04.13.01.22060	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø22 x 60 mm
04.13.01.22062	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø22 x 62 mm
04.13.01.22064	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø22 x 64 mm
04.13.01.22066	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø22 x 66 mm
04.13.01.22068	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø22 x 68 mm
04.13.01.22070	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø22 x 70 mm
04.13.01.26044	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø26 x 44 mm
04.13.01.26046	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø26 x 46 mm
04.13.01.26048	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø26 x 48 mm
04.13.01.26050	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø26 x 50 mm
04.13.01.26052	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø26 x 52 mm
04.13.01.26054	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø26 x 54 mm
04.13.01.26056	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø26 x 56 mm
04.13.01.26058	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø26 x 58 mm
04.13.01.26060	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø26 x 60 mm
04.13.01.26062	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø26 x 62 mm
04.13.01.26064	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø26 x 64 mm
04.13.01.26066	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø26 x 66 mm
04.13.01.26068	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø26 x 68 mm
04.13.01.26070	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø26 x 70 mm
04.13.01.28044	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø28 x 44 mm
04.13.01.28046	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø28 x 46 mm
04.13.01.28048	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø28 x 48 mm
04.13.01.28050	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø28 x 50 mm
04.13.01.28052	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø28 x 52 mm
04.13.01.28054	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø28 x 54 mm
04.13.01.28056	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø28 x 56 mm
04.13.01.28058	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø28 x 58 mm
04.13.01.28060	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø28 x 60 mm
04.13.01.28062	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø28 x 62 mm
04.13.01.28064	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø28 x 64 mm
04.13.01.28066	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø28 x 66 mm
04.13.01.28066	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø28 x 68 mm
04.13.01.28070	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø28 x 70 mm
04.13.01.32044	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø32 x 44 mm
04.13.01.32046	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø32 x 46 mm
04.13.01.32048	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø32 x 48 mm
04.13.01.32050	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø32 x 50 mm
04.13.01.32052	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø32 x 52 mm
04.13.01.32054	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø32 x 54 mm
04.13.01.32056	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø32 x 56 mm
04.13.01.32058	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø32 x 58 mm
04.13.01.32060	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø32 x 60 mm
04.13.01.32062	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø32 x 62 mm
04.13.01.32064	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø32 x 64 mm

04.13.01.32066	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø32 x 66 mm
04.13.01.32068	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø32 x 68 mm
04.13.01.32070	Inserto Acetabular Traba Lateral Ø32 x 70 mm
04.13.02.22042	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø22 x 42 mm
04.13.02.22044	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø22 x 44 mm
04.13.02.22046	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø22 x 46 mm
04.13.02.22048	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø22 x 48 mm
04.13.02.22050	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø22 x 50 mm
04.13.02.22052	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø22 x 52 mm
04.13.02.22054	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø22 x 54 mm
04.13.02.22056	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø22 x 56 mm
04.13.02.22058	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø22 x 58 mm
04.13.02.22060	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø22 x 60 mm
04.13.02.22062	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø22 x 62 mm
04.13.02.22064	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø22 x 64 mm
04.13.02.22066	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø22 x 66 mm
04.13.02.22068	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø22 x 68 mm
04.13.02.22070	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø22 x 70 mm
04.13.02.26042	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø26 x 42 mm
04.13.02.26044	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø26 x 44 mm
04.13.02.26046	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø26 x 46 mm
04.13.02.26048	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø26 x 48 mm
04.13.02.26050	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø26 x 50 mm
04.13.02.26052	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø26 x 52 mm
04.13.02.26054	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø26 x 54 mm
04.13.02.26056	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø26 x 56 mm
04.13.02.26058	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø26 x 58 mm
04.13.02.26060	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø26 x 60 mm
04.13.02.26062	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø26 x 62 mm
04.13.02.26064	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø26 x 64 mm
04.13.02.26066	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø26 x 66 mm
04.13.02.26068	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø26 x 68 mm
04.13.02.26070	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø26 x 70 mm
04.13.02.28042	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø28 x 42 mm
04.13.02.28044	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø28 x 44 mm
04.13.02.28046	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø28 x 46 mm
04.13.02.28048	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø28 x 48 mm
04.13.02.28050	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø28 x 50 mm
04.13.02.28052	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø28 x 52 mm
04.13.02.28054	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø28 x 54 mm
04.13.02.28056	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø28 x 56 mm
04.13.02.28058	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø28 x 58 mm
04.13.02.28060	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø28 x 60 mm
04.13.02.28062	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø28 x 62 mm
04.13.02.28064	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø28 x 64 mm

04.13.02.28066	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø28 x 66 mm
04.13.02.28068	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø28 x 68 mm
04.13.02.28070	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø28 x 70 mm
04.13.02.32044	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø32 x 44 mm
04.13.02.32046	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø32 x 46 mm
04.13.02.32048	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø32 x 48 mm
04.13.02.32050	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø32 x 50 mm
04.13.02.32052	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø32 x 52 mm
04.13.02.32054	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø32 x 54 mm
04.13.02.32056	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø32 x 56 mm
04.13.02.32058	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø32 x 58 mm
04.13.02.32060	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø32 x 60 mm
04.13.02.32062	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø32 x 62 mm
04.13.02.32064	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø32 x 64 mm
04.13.02.32066	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø32 x 66 mm
04.13.02.32068	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø32 x 68 mm
04.13.02.32070	Inserto Acetabular 09 Puntos Ø32 x 70 mm
04.13.03.28058	Inserto Acet. 09 Puntos c/ Traba Ø28 x 58mm
04.13.03.28060	Inserto Acet. 09 Puntos c/ Traba Ø28 x 60mm
04.13.04.28048	Inserto Acet. c/ Traba Ø28 x 48mm
04.13.04.28054	Inserto Acet. c/ Traba Ø28x54mm
04.13.04.28056	Inserto Acet. c/Traba Ø28x56mm
04.13.04.28058	Inserto Acet. c/ Traba Ø28x58mm
04.13.04.28060	Inserto Acet. c/ Traba Ø28x60mm

El Inserto Acetabular es registrado en Anvisa con el n° 10417940023.

Tabla – Cotilo Sin Cemento en Titanio

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
04.01.03.22042	Cotilo MD4 – Malla Ø22x42mm 18 Puntos c/ Inserto
04.01.03.22044	Cotilo MD4 - Malla Ø22x44mm 18 Puntos c/ Inserto
04.01.03.22046	Cotilo MD4 - Malla Ø22x46mm 18 Puntos c/ Inserto
04.01.03.22048	Cotilo MD4 - Malla Ø22x48mm 18 Puntos c/ Inserto
04.01.03.28050	Cotilo MD4 - Malla Ø28x50mm 18 Puntos c/ Inserto
04.01.03.28052	Cotilo MD4 - Malla Ø28x52mm 18 Puntos c/ Inserto
04.01.03.28054	Cotilo MD4 - Malla Ø28x54mm 18 Puntos c/ Inserto
04.01.03.28056	Cotilo MD4 - Malla Ø28x56mm 18 Puntos c/ Inserto
04.01.03.28058	Cotilo MD4 - Malla Ø28x58mm 18 Puntos c/ Inserto
04.01.03.28060	Cotilo MD4 - Malla Ø28x60mm 18 Puntos c/ Inserto
04.01.03.28062	Cotilo MD4 - Malla Ø28x62mm 18 Puntos c/ Inserto
04.01.03.28064	Cotilo MD4 - Malla Ø28x64mm 18 Puntos c/ Inserto
04.01.03.28066	Cotilo MD4 - Malla Ø28x66mm 18 Puntos c/ Inserto
04.01.03.28068	Cotilo MD4 - Malla Ø28x68mm 18 Puntos c/ Inserto
04.01.03.28070	Cotilo MD4 - Malla Ø28x70mm 18 Puntos c/ Inserto
04.01.04.22042	Cotilo MD4 - Plasma Spray Ø22x42mm c/ Inserto
04.01.04.22044	Cotilo MD4 - Plasma Spray Ø22x44mm c/ Inserto
04.01.04.22046	Cotilo MD4 - Plasma Spray Ø22x46mm c/ Inserto

04.01.04.22048	Cotilo MD4 - Plasma Spray Ø22x48mm c/ Inserto
04.01.04.28050	Cotilo MD4 - Plasma Spray Ø28x50mm c/ Inserto
04.01.04.28052	Cotilo MD4 - Plasma Spray Ø28x52mm c/ Inserto
04.01.04.28054	Cotilo MD4 - Plasma Spray Ø28x52mm c/ Inserto
04.01.04.28056	Cotilo MD4 - Plasma Spray Ø28x56mm c/ Inserto
04.01.04.28058	Cotilo MD4 - Plasma Spray Ø28x58mm c/ Inserto
04.01.04.28060	Cotilo MD4 - Plasma Spray Ø28x60mm c/ Inserto
04.01.04.28062	Cotilo MD4 - Plasma Spray Ø28x62mm c/ Inserto
04.01.04.28064	Cotilo MD4 - Plasma Spray Ø28x64mm c/ Inserto
04.01.04.28066	Cotilo MD4 - Plasma Spray Ø28x66mm c/ Inserto
04.01.04.28068	Cotilo MD4 - Plasma Spray Ø28x68mm c/ Inserto
04.01.04.28070	Cotilo MD4 - Plasma Spray Ø28x70mm c/ Inserto
04.01.05.22042	Cotilo MD4 - Porous Coated Ø22x42mm 18 Puntos c/ Inserto
04.01.05.22044	Cotilo MD4 - Porous Coated Ø22x44mm 18 Puntos c/ Inserto
04.01.05.22046	Cotilo MD4 - Porous Coated Ø22x46mm 18 Puntos c/ Inserto
04.01.05.22048	Cotilo MD4 - Porous Coated Ø22x48mm 18 Puntos c/ Inserto
04.01.05.28050	Cotilo MD4 - Porous Coated Ø28x50mm 18 Puntos c/ Inserto
04.01.05.28052	Cotilo MD4 - Porous Coated Ø28x52mm 18 Puntos c/ Inserto
04.01.05.28054	Cotilo MD4 - Porous Coated Ø28x54mm 18 Puntos c/ Inserto
04.01.05.28056	Cotilo MD4 - Porous Coated Ø28x56mm 18 Puntos c/ Inserto
04.01.05.28058	Cotilo MD4 - Porous Coated Ø28x58mm 18 Puntos c/ Inserto
04.01.05.28060	Cotilo MD4 - Porous Coated Ø28x60mm 18 Puntos c/ Inserto
04.01.05.28062	Cotilo MD4 - Porous Coated Ø28x62mm 18 Puntos c/ Inserto
04.01.05.28064	Cotilo MD4 - Porous Coated Ø28x64mm 18 Puntos c/ Inserto
04.01.05.28066	Cotilo MD4 - Porous Coated Ø28x66mm 18 Puntos c/ Inserto
04.01.05.28068	Cotilo MD4 - Porous Coated Ø28x68mm 18 Puntos c/ Inserto
04.01.05.28070	Cotilo MD4 - Porous Coated Ø28x70mm 18 Puntos c/ Inserto
04.01.19.22042	Cotilo MD4 - Porous Coated Ø22x42mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.19.22044	Cotilo MD4 - Porous Coated Ø22x44mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.19.22046	Cotilo MD4 - Porous Coated Ø22x46mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.19.22048	Cotilo MD4 - Porous Coated Ø22x48mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.19.28050	Cotilo MD4 - Porous Coated Ø28x50mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.19.28052	Cotilo MD4 - Porous Coated Ø28x52mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.19.28054	Cotilo MD4 - Porous Coated Ø28x54mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.19.28056	Cotilo MD4 - Porous Coated Ø28x56mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.19.28058	Cotilo MD4 - Porous Coated Ø28x58mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.19.28060	Cotilo MD4 - Porous Coated Ø28x60mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.19.28062	Cotilo MD4 - Porous Coated Ø28x62mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.19.28064	Cotilo MD4 - Porous Coated Ø28x64mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.19.28066	Cotilo MD4 - Porous Coated Ø28x66mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.19.28068	Cotilo MD4 - Porous Coated Ø28x68mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.19.28070	Cotilo MD4 - Porous Coated Ø28x70mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.20.22042	Cotilo MD4 - Malla Ø22x42mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.20.22044	Cotilo MD4 - Malla Ø22x44mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.20.22046	Cotilo MD4 - Malla Ø22x46mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.20.22048	Cotilo MD4 - Malla Ø22x48mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.20.22050	Cotilo MD4 - Malla Ø22x50mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.20.22052	Cotilo MD4 - Malla Ø22x52mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.20.22054	Cotilo MD4 - Malla Ø22x54mm Traba Lateral c/ Inserto

04.01.20.22056	Cotilo MD4 - Malla Ø22x56mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.20.22058	Cotilo MD4 - Malla Ø22x58mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.20.22060	Cotilo MD4 - Malla Ø22x60mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.20.22062	Cotilo MD4 - Malla Ø22x62mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.20.22064	Cotilo MD4 - Malla Ø22x64mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.20.22066	Cotilo MD4 - Malla Ø22x66mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.20.22068	Cotilo MD4 - Malla Ø22x68mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.20.22070	Cotilo MD4 - Malla Ø22x70mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.20.28048	Cotilo MD4 - Malla Ø28x48mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.20.28050	Cotilo MD4 - Malla Ø28x50mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.20.28052	Cotilo MD4 - Malla Ø28x52mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.20.28054	Cotilo MD4 - Malla Ø28x54mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.20.28056	Cotilo MD4 - Malla Ø28x56mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.20.28058	Cotilo MD4 - Malla Ø28x58mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.20.28060	Cotilo MD4 - Malla Ø28x60mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.20.28062	Cotilo MD4 - Malla Ø28x62mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.20.28064	Cotilo MD4 - Malla Ø28x64mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.20.28066	Cotilo MD4 - Malla Ø28x66mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.20.28068	Cotilo MD4 - Malla Ø28x68mm Traba Lateral c/ Inserto
04.01.20.28070	Cotilo MD4 - Malla Ø28x70mm Traba Lateral c/ Inserto

El Cotilo sin Cemento es registrado en Anvisa con el nº 10417940030.

Tabla – Cotilo Sin Cemento en Cromo Cobalto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
04.01.22	Cotilo Sin Cemento Cr Co	22 x 44 mm
		22 x 46 mm
		22 x 48 mm
04.01.22	Cotilo Sin Cimento CrCo	28 x 50 mm
		28 x 52 mm
		28 x 54 mm
		28 x 56 mm
		28 x 58 mm
		28 x 60 mm
		28 x 62 mm
		28 x 62 mm

El Cotilo sin Cemento CrCo es registrado en Anvisa con el nº 10417940023.

Tabla – Vástago Sin Cemento

CÓDIGO	DESCRIPÇÃO
04.30.09.09117	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 10/11Primaria 09x117 mm
04.30.09.10122	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 10/11Primaria 10x122 mm
04.30.09.11127	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 10/11 Primaria 11 x 127 mm
04.30.09.12132	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 10/11 Primaria 12 x 132 mm
04.30.09.13137	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 10/11 - Primaria 13 x 137
04.30.09.14142	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 10/11 - Primaria 14 x 142
04.30.09.15147	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 10/11 - Primaria 15 x 147

04.30.09.16152	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 10/11 - Primaria 16 x 152
04.30.09.17157	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 10/11 - Primaria 17 x 157 mm
04.30.10.09117	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 10/11 - Revisión 09 x 117 mm
04.30.10.10170	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 10/11 - Revisión 10 x 170 m
04.30.10.11180	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 10/11 - Revisión 11 x 180 m
04.30.10.12190	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 10/11 - Revisión 12 x 190 m
04.30.10.13200	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 10/11 - Revisión 13 x 200 m
04.30.10.14210	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 10/11 - Revisión 14x 210mm
04.30.10.15220	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 10/11 - Revisión 15 x 220 m
04.30.10.16230	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 10/11 - Revisión 16 x 230 m
04.30.10.17240	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 10/11 - Revisión 17 x 240 m
04.30.11.07107	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Primaria 07 x 107 mm
04.30.11.08112	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Primaria 08 x 112 mm
04.30.11.09117	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Primaria 09 x 117 mm
04.30.11.09160	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Primaria 09 x 160 mm
04.30.11.10122	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Primaria 10 x 122 mm
04.30.11.10160	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Primaria 10 x 160 mm
04.30.11.11127	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Primaria 11 x 127 mm
04.30.11.11160	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Primaria 11 x 160 mm
04.30.11.12132	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Primaria 12 x 132 mm
04.30.11.12180	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Primaria 12 x 240 mm
04.30.11.13137	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Primaria 13 x 137 mm
04.30.11.13180	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Primaria 13 x 180 mm
04.30.11.14142	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Primaria 14 x 142mm
04.30.11.14180	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Primaria 14 x 180 mm
04.30.11.15147	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Primaria 15 x 147mm
04.30.11.15200	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Primaria 15 x 200 mm
04.30.11.16152	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Primaria 16 x 152mm
04.30.11.16200	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Primaria 16 x 200 mm
04.30.11.17157	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Primaria 17 x 157mm
04.30.11.17200	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Primaria 17 x 200 mm
04.30.12.09220	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Revisión 09 x 220 mm
04.30.12.10170	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Revisión 10 x 170 mm
04.30.12.10220	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Revisión 10 x 220 mm
04.30.12.11180	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Revisión 11 x 180 mm
04.30.12.11220	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Revisión 11 x 220 mm
04.30.12.12190	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Revisión 12 x 190 mm
04.30.12.12240	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Revisión 12 x 240 mm
04.30.12.12300	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Revisión 12 x 300mm
04.30.12.13200	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Revisión 13 x 200 mm
04.30.12.13240	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Revisión 13 x 240 mm
04.30.12.14210	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Revisión 14 x 210 mm
04.30.12.14240	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Revisión 14 x 240 mm

04.30.12.14300	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Revisión 14 x 300mm
04.30.12.15220	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Revisión 15 x 220 mm
04.30.12.15260	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Revisión 16 x 260 mm
04.30.12.16230	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 Revisión 16 x 230 mm
04.30.12.16260	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Revisión 16 x 260 mm
04.30.12.17240	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Revisión 17 x 240 mm
04.30.12.17260	Prótesis Femoral MD4 c/ Porous Coated Cono 12 /14 - Revisión 17 x 260 mm
04.30.48.09117	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Primaria 09 x 117 mm
04.30.48.09160	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Primaria 09 x 160 mm
04.30.48.10122	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Primaria 10 x 122 mm
04.30.48.10160	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Primaria 10 x 160 mm
04.30.48.11127	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Primaria 11 x 127 mm
04.30.48.11160	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Primaria 11 x 160 mm
04.30.48.12132	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Primaria 12 x 132 mm
04.30.48.12180	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Primaria 12 x 180 mm
04.30.48.13137	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Primaria 13 x 137 mm
04.30.48.14142	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Primaria 14 x 142 mm
04.30.48.14180	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Primaria 14 x 180 mm
04.30.48.15147	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Primaria 15 x 147 mm
04.30.48.15200	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Primaria 15 x 200 mm
04.30.48.16152	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Primaria 16 x 152 mm
04.30.48.16200	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Primaria 16 x 200 mm
04.30.48.17157	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Primaria 17 x 157 mm
04.30.48.17200	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Primaria 17 x 200 mm
04.30.49.09220	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Revisión 09 x 220 mm
04.30.49.10170	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Revisión 10 x 170 mm
04.30.49.10220	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Revisión 10 x 220 mm
04.30.49.11180	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Revisión 11 x 180 mm
04.30.49.11220	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Revisión 11 x 220 mm
04.30.49.12190	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Revisión 12 x 190 mm
04.30.49.12240	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Revisión 12 x 240 mm
04.30.49.13200	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Revisión 13 x 200 mm
04.30.49.13240	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Revisión 13 x 240 mm
04.30.49.14210	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Revisión 14 x 210 mm
04.30.49.14240	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Revisión 14 x 240 mm
04.30.49.15220	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Revisión 15 x 220 mm
04.30.49.15260	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Revisión 15 x 260 mm
04.30.49.16230	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Revisión 16 x 230 mm
04.30.49.16260	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Revisión 16 x 260 mm
04.30.49.17240	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Revisión 17 x 240 mm
04.30.49.17260	Prótesis Femoral MD4 Ti c/ Plasma Spray Cono 12 /14 - Revisión 17 x 260 mm

El Vástago sin Cemento CrCo es registrado en Anvisa con el nº 10417940045.

La selección y decisión por Sistema cementado o Sin cemento depende de la patología, de la edad del paciente y de la experiencia del cirujano responsable. Siendo de su responsabilidad la correcta selección e implantación del material.

Consulte su representante MDT para mayores informaciones acerca de los ancilares de la Cabeza Femoral Intercambiable.

CONTRAINDICACIÓN

Como en lo que se refiere al tratamiento médico de manera general, toda técnica quirúrgica, mismo cuando bien aplicada, puede presentar problemas, complicaciones y situaciones en que el objetivo final del tratamiento no es atingido total o parcialmente y siendo sus contraindicaciones relativas dependiendo siempre del caso y a criterio de la evaluación del médico asistente, desde la anatomía, biología local y sistémica, el cuidado del planeamiento y preparo pre-operatorio, la ejecución y aplicación de técnica perfecta en el intra-operatorio y mismo el perfil socioeconómico y cultural para que haya respecto y colaboración, por parte del paciente, las recomendaciones y seguimiento posoperatorio. Pero hay reglas generales que deben ser seguidas para evitarse problemas.

Abajo están enumeradas algunas de las contraindicaciones, aunque relativas (criterio médico), más frecuentes relacionadas al implante:

- Infección activa en sitio a ser operado o en otras regiones, artropatía neuropática, ausencia de paresia de la musculatura que controla la rodilla, enfermedad neurológica progresiva, enfermedades óseas rápidamente destructivas, u osteonecrosis pos irradiación.
- El componente Patelar no debe ser utilizado caso no se consiga un soporte óseo adecuado que garanta la estabilidad del implante. En estas circunstancias, métodos suplementares de inserción ósea deben ser utilizados en conjunto, sea con el injerto autólogo, u homólogo, o aún con auxilio de mallas y accesorios.
- La necrosis ósea inducida por irradiación en consecuencia de radioterapia para el tratamiento de cáncer, es contraindicación relativa a la sustitución articular de la rodilla, una vez que la falta de soporte óseo acetabular puede llevar a la relajación precoz del implante.

- Enfermedades circulatorias locales, insuficiencias arteriales como venosas, que predisponen al aparecimiento de dehiscencias y necrosis de piel, al aparecimiento o manutención de infecciones, a problemas y fenómenos trombo-embólico.
- Enfermedades sistémicas, que por disminución de defesas locales o generales o de condiciones circulatorias pueden predisponer a complicaciones como dehiscencias e infecciones.
- Enfermedades neurológicas que puedan traer alteraciones en la resistencia ósea, o actividad neuro-muscular que pueda sobrecargar el implante.
- Enfermedades óseas rápidamente destructivas (por ejemplo: artropatía de Charcot, tumores óseos, etc.).
- Osteonecrosis, especialmente pos-irradiación puede traer problemas de infecciones y dehiscencias.
- La presencia sabida o informada de condiciones particulares del paciente que pueda traer alguna bio-incompatibilidad con la mezcla metálica usada en la fabricación del implante.

El Sistema de Reconstrucción Femoral Cementado de la Cadera también es contraindicado para pacientes:

- Jóvenes y activos;
- que practican actividades deportivas;
- Pacientes con peso superior a 102 Kg;
- Pacientes con patología infecciosa previa o actual;
- Pacientes con cuadro demencial o con alteraciones neurológicas de los miembros inferiores;
- Condiciones particulares del paciente: senilidad, alcoholismo e infecciones. Estas condiciones deben ser cuidadosamente investigadas por el cirujano, lo cual debe alertar al paciente acerca de los riesgos advenidos de estas particularidades.

La utilización, en los casos arriba, puede provocar desgaste o relajación precoz del Componente acetabular por exceso de sollicitación mecánica, infección o dislocación protética

EFFECTOS ADVERSOS

En adición al hecho de que riesgos obvios pueden ocurrir en presencia de implantes ortopédicos, como la falla, aflojamiento y fractura, los siguientes riesgos de respuestas tisulares adversas y posibles complicaciones deben ser presentados y discutidos con el paciente:

- Aún que ninguna asociación científicamente comprobada entre la utilización de implantes ortopédicos, con las características de los materiales como los utilizados en los vástagos, y la ocurrencia de cáncer, cualesquier riesgos e incerteza que se refieren a los efectos a largo plazo de sustituciones articulares, debe ser discutidos con el paciente antes del acto quirúrgico. El paciente debe también ser informado de cualesquier circunstancias que llevan al daño tisular crónico pueden ser oncogénicas. Tejidos cancerosos encontrados alrededor de implantes pueden estar relacionados a factores no ligados directamente al implante como: metástasis de tumores primarios de pulmón, mama, sistema digestivo y otros, o aún debido a implantación de células cancerosas que pueden ocurrir durante procedimientos operatorios o diagnósticos como la biopsia o aún resultante de progresión de la enfermedad de Paget.
- La implantación de material extraño en tejidos orgánicos puede obtener respuestas inflamatorias, que pueden ocurrir, por ejemplo, en presencias de debris oriundos de implantes (como debris metálicos o de polietileno), que pueden ocasionar respuesta histiocítica tipo granuloma de cuerpo extraño y así ocasionando destrucción ósea, asociada o no a aflojamiento del implante.
- Sensibilidad o atopia al metal puede ser encontrada después que implantes de dispositivos ortopédicos, como por ejemplo, la que ocurre con el níquel, cobalto y cromo, que están presentes en mezclas de acero inoxidable de utilización ortopédica, son acentuadamente menos antigénicos y tienen su uso recomendado también en pacientes con historia anterior de alergias o sensibilidad a metales.

PRECAUCIONES

- El cirujano no deberá iniciar la utilización clínica de las cabezas intercambiables metálicas antes de leer completamente estas instrucciones de utilización. Adicionalmente deberá utilizar las cabezas, bien como instrumentales de utilizados

en conjunto con las mismas, en ambientes especializados (ambulatorios o salas quirúrgicas). El equipo médico deberá verificar la integridad de las cabezas e instrumentales al final del proceso de esterilización y antes de la utilización.

- Estos sistemas deben ser utilizados solamente en conjunto con el cemento óseo acrílico, la no utilización podrá provocar falencia del dispositivo y pérdida progresiva de estoque óseo.
- Observe, antes de la abertura del envase, si la constitución metálica de la cabeza femoral es compatible con el vástago. La mezcla de las mezclas puede inducir a corrosión galvánica de la unión de la cabeza con el cono Morse.
- Es recomendable el uso de antibióticos como terapia profiláctica en pacientes portadores de sustituciones articulares que se someta a procedimientos que ocasionen bacteriemia transitoria (procedimientos odontológicos, exámenes endoscópicos, cateterización de largos vasos en la ingle y otros).
- La Cabeza Intercambiable Metálica fue concebida para ser implantada mediante la utilización de instrumental, especialmente desarrollado para este fin. Cualesquier improvisaciones con diferentes instrumentales o técnica quirúrgica imprecisa pueden comprometer la calidad de la fijación y/o posicionamiento del implante.
- Se recomienda previamente la obtención de una cavidad hemisférica con lecho óseo viable para después proseguir con la inserción de cemento óseo y del componente.
- En algunas ocasiones, refuerzos en forma de injertos óseos o dispositivos de contención y soporte pueden ser indicados para restablecer el estoque óseo y garantizar una buena estabilidad del implante.
- La implantación sobre el lecho óseo inadecuado puede causar aflojamiento prematuro, pérdida del estoque óseo y metalosis.
- La utilización en conjunto con componentes acetabulares de otros fabricantes puede resultar en incongruencia entre la cabeza femoral y la cavidad del implante.
- **PRODUCTO DE USO ÚNICO - NO REUSAR**
- **La Cabeza Intercambiable Metálica es fornecida estéril**
- Utilizar inmediatamente después de la abertura del sello de esterilización.
- Descartar y NO UTILIZAR dispositivos abiertos o dañados. Utilizar solamente dispositivos que se encuentren embalados en envases cerradas y no dañadas.
- **NO UTILIZAR** en caso de pérdida de estabilidad del dispositivo.

- **NO REESTERILIZAR.**

EL PACIENTE DEBERÁ SER INFORMADO ACERCA DE:

- Todas las restricciones posoperatorias, principalmente las relacionadas con actividades deportivas y ocupacionales.
- El hecho de que las complicaciones o fallas de la artroplastia total de cadera son más fáciles de ocurrir en:
 - Pacientes con expectativas funcionales además de las que pueden ser promovidas por la sustitución articular;
 - Pacientes con alto peso corporal, principalmente con más de 102 Kg;
 - Pacientes jóvenes y/o activos;
 - Pacientes con esqueleto pequeño;
- La necesidad de acompañamiento médico periódico, para se observen posibles alteraciones del estado del implante y del hueso adyacente. Sin acompañamiento a soltura de los componentes u ocurrencia de osteolisis no puede ser detectada.
- La no realización de cirugía de Revisión cuando de la soltura de componentes u osteolisis femoral puede resultar en pérdida progresiva del estoque óseo periprotético.
- La necesidad de informar, cuando de la realización de exámenes de resonancia magnética, acerca del hecho de ser portador de prótesis metálica.
- El paciente debe ser instruido, a criterio médico, para que utilice soportes externos, auxilio para vagar y aparatos ortopédicos proyectados para inmovilizar el área de fractura y limitar la carga.
- Debiese hacer comprender completamente y alertar al paciente que el producto no sustituye y no tiene el mismo desarrollo del hueso normal y que por lo tanto, puede quebrarse, deformarse o soltarse en resultado de los esfuerzos o actividades excesivas de carga precoz, etc.
- Los productos aquí descritos fueron desarrollados para utilización en las circunstancias descritas arriba, de modo que cualesquier otras utilidades son consideradas contraindicadas o sin substrato científico que soporten su uso.
- Las informaciones listadas en los tópicos Indicaciones, Contraindicaciones, Efectos Adversos, Precauciones y Advertencias.

ADVERTENCIAS

- La abertura del envase para utilización quirúrgica deberá ser realizada por profesional de enfermería, habilitado para este procedimiento.
- Esterilización inadecuada del instrumental puede causar infección protética.
- No utilice el producto si la validez estuviera vencida o con envase violada. Los cuidados con este material, es de responsabilidad de personal habilitado.
- Producto Médico – Hospitalar de uso único – Descartar después de la remoción, recomendamos que las piezas sean cortadas, entortadas o limadas para su inutilización, pero para el descarte del producto, observe la legislación local.
- Nunca reutilice un implante, ya que mismo sin apariencia externa de daños, esfuerzos previos pueden reducir su vida útil.
- Todo material removido, dañado o inadecuado para uso debe ser enviado al fabricante para que sea destruido.
- Los resultados clínicos y la durabilidad de los implantes en artroplastia total del fémur son extremadamente dependientes del alineamiento tridimensional de los componentes siendo, por lo tanto, indispensable una técnica quirúrgica precisa.
- Manipule con cuidado.
- El paciente debe hacer acompañamiento médico periódico para verificar las condiciones del implante y del hueso adyacente.
- Debiese respetar el límite de resistencia del implante, que varía conforme el tipo, con riesgo de enflaquecimiento del mismo y posible fractura del material.
- No deben ser utilizados componentes de fabricantes diferentes.
- El uso de diferentes mezclas en las uniones metálicas puede causar corrosión del implante.
- Fecha de fabricación, plazo de validez y n° de lote: fíjate etiqueta.

Instrucciones de uso

Las técnicas de cirugía varían de acuerdo con la elección del médico cirujano, cabiendo al cirujano la elección final del método, tipo y dimensión de los productos que serán empleados, bien como los criterios de evaluación de los resultados de la cirugía.

- Manipular las Cabezas Intercambiables Metálicas exclusivamente en ambientes adecuados (ambulatorios o salas quirúrgicas) con los debidos cuidados (solamente deberán ser manipulados con guantes esterilizados). Solamente profesionales capacitados deben manipular e implantar el producto.
- Las Cabezas Intercambiables Metálicas deberán ser aplicados de acuerdo con las exigencias y técnicas quirúrgicas adecuadas.
- Los resultados clínicos y la durabilidad de los implantes son extremadamente dependientes del alineamiento tridimensional de los componentes, siendo, por lo tanto, indispensable una técnica quirúrgica precisa.
- El uso de diferentes mezclas en las uniones metálicas puede causar corrosión galvánica del implante.

No utilizar Cabezas Intercambiables Metálicas en conjunto con productos de otras marcas, ya que puede haber problemas de incompatibilidad entre los materiales.

Riesgo de Contaminación

Considerando que el Componente Patelar entra en contacto con tejido y fluidos corporales, existe el riesgo de contaminación biológica y transmisión de enfermedades virales tales como hepatitis y HIV etc. Por lo tanto, los implantes removidos deben ser tratados como materiales potencialmente contaminantes.

Descarte del Producto

Quedas o aplastamiento del producto sobre superficies duras pueden causar daños al producto. Cuando abrir el envase, inspeccionar la integridad del producto. No utilizar caso se observe alguna anomalía.

Después de la remoción del cuerpo del paciente, descartar los implantes, ya que **no deben ser reusados**.

Los implantes removidos o que por accidente se encuentren defectuosos deben ser inutilizados para uso antes del descarte. Recomendamos que las piezas sean cortadas, entortadas o limadas para su inutilización.

Para descartar las Cabezas Intercambiables removidas, seguir los procedimientos legales locales del país para descarte de productos potencialmente contaminantes

Rastreabilidad

Para garantizar la rastreabilidad del producto implantando, y cumplir con los requisitos de vigilancia sanitaria, recomendamos que el cirujano responsable por el implante notifique al Distribuidor los siguientes datos referentes al producto implantado, paciente y cirugía:

- Nombre del cirujano
- Fecha de la cirugía
- Nombre del Paciente que recibió el implante
- Código del Producto
- Número de Lote

El Componente Patelar tiene grabado en el cuerpo, las siguientes informaciones:

- Nombre de la Empresa
- Lote de Fabricación
- Código del producto

Almacenamiento:

Recomendase local seco y ventilado, lejos de incidencia de rayo solar directo. No pueden ser almacenados directamente en el suelo, (altura mínima = 20 cm). No pueden quedarse en estantes altos, próximos a lámparas (para no reseca el envase o apagar la etiqueta). No puede ser almacenado en áreas donde sean utilizados sustancias contaminantes como insecticidas, pesticidas o materiales de limpieza.

Transporte:

Transportar con cuidado evitando la queda y atrito de forma que no provoque defectos en el acabado de la superficie. Siempre observar la integridad del envase.

Mantener los implantes siempre en sus envases originales, hasta que Sean utilizados, bajo la responsabilidad de que el equipo médico/hospitalar designada para este fin.

Fecha de fabricación, plazo de validez y n° de lote: fijate etiqueta.

No utilizar producto con plazo de validez vencido.

Otras Informaciones



Fabricado y distribuido por:

MDT – Indústria Comércio Importação e Exportação de Implantes SA

Dirección: Av. Brasil, nº. 2983 – Distrito Industrial – Rio Claro/SP – Brasil

CEP: 13.505-600

Tel./Fax: (55-19) 2111-6500

CNPJ: 01.025.974/0001-92

Responsable Técnico: Miguel Lopes Monte Júnior – CREA: 0601150192

Registro ANVISA nº.: 10417940036

Revisión: 01

Emisión: 20/01/2006

ALERTA INSTRUCCIÓN DE USO

Estas INSTRUCCIONES DE USO están disponibles en formato no impreso, disponibles en el la dirección electrónica del fabricante www.mdt.com.br.

Las INSTRUCCIONES DE USO están indexadas en el sitio web a través del NUMERO REGISTRO/ ANVISA y el respectivo NOMBRE COMERCIAL del producto, informados en el rótulo del producto adquirido.

Todas las INSTRUCCIONES DE USO disponibles en el sitio web tienen la identificación de la revisión y fecha de emisión del documento. Siendo que el usuario debe estar atento para la correcta versión (revisión y fecha de emisión) del documento en relación a la FECHA DE FABRICACIÓN informada en el rótulo del producto adquirido.

Caso sea de interés del usuario, las INSTRUCCIONES DE USO podrán ser suplidas en formato impreso, sin costo adicional. Siendo que la solicitud de las mismas deberá ser realizada junto al SAC (Servicio de Atendimento al Cliente) del fabricante, informado en secuencia:

Servicio de Atendimento al Cliente

Teléfono:+55 19 2111.6500

FAX:+55 19 2111.6500

<http://www.mdt.com.br>

Avenida Brasil, 2983 – Distrito Industrial CEP: 13505-600 | Rio Claro – São Paulo – Brasil

Horario de atendimento: 8hs a las 17hs, de lunes hasta viernes, excepto días festivos.



MDT® - INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORT. E EXPORT. DE IMPLANTES SA
Av. Brasil, 2983 - Dt. Industrial | 13505-600 - Rio Claro / SP - Brasil
Tel./Fax. *55 (19) 2111.6500 | www.mdt.com.br