


Fusimax[®] TLP

Cage Intersomático Transforaminal

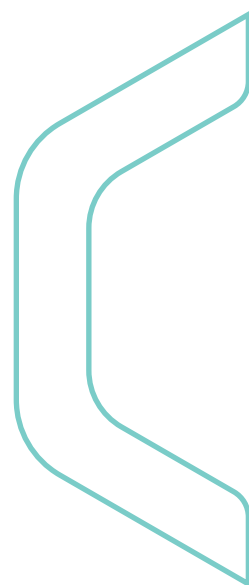

Fusimax® TLP

ANVISA 10417940091




PEEK | Ta


Ref. Nº

A x B x C x D

04.36.27.00008	08 x 8 x 29,2 x 10,7 mm
04.36.27.00010	10 x 8 x 29,2 x 10,7 mm
04.36.27.00012	12 x 8 x 29,2 x 10,7 mm
04.36.27.00014	14 x 8 x 29,2 x 10,7 mm

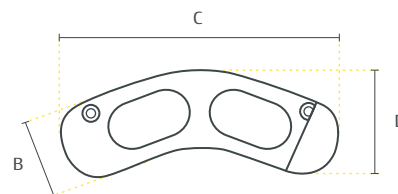


O dispositivo Intersomático conhecido como "Cage" é utilizado para restituir o espaço intervertebral da coluna, conhecido como disco. O cage Fusimax® TLP é um dispositivo lombar com acesso unilateral Intersomático favorecendo menor manipulação das raízes nervosas através de técnica minimamente invasiva, reduzindo o tempo de cirurgia.

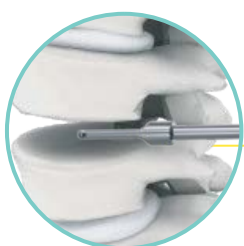



Após a discectomia é feita a distração do espaço discal com a utilização progressiva dos distratores até atingir a estabilização e assim pré-definir a altura do implante a ser utilizado.

Prepare o espaço discal com o uso progressivo das raspas para receber o implante. O Cage deve ser correspondente à maior raspa utilizada.

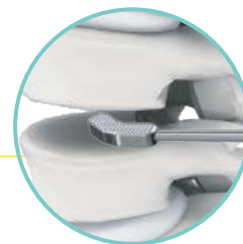

Posicione o Cage conforme indicação gravada na extremidade da chave introduzora.

Proteja a raiz nervosa e saco dural pelo afastador e introduza o Cage.

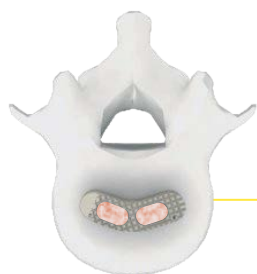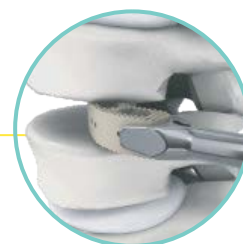

Técnica simples e segura, o cirurgião possui uma menor carga de trabalho diminuindo também o tempo cirúrgico e os riscos intraoperatórios.